


# EMERGENCY BANDAGE


## ANWENDUNG T3 BANDAGE




**STEP 1:** Platzieren Sie die Wundauflage auf der Wunde und wickeln Sie die Bandage um die Extremität.

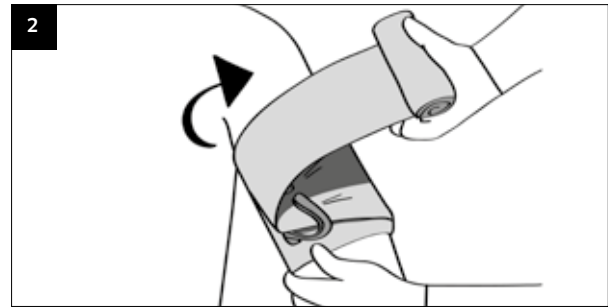


**STEP 2:** Führen Sie die Bandage durch den Druckbügel. Ziehen Sie die Bandage in entgegengesetzter Richtung und drücken Sie den Druckbügel auf die Auflage.

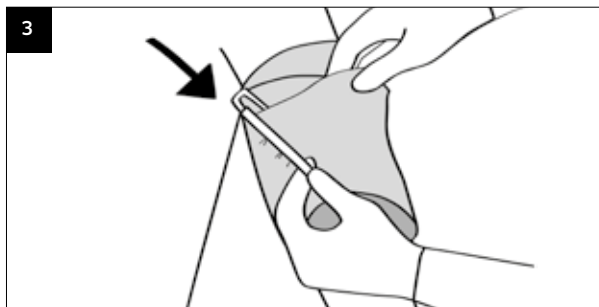

**STEP 3:** Fixieren Sie das Ende der Bandage mit Hilfe der Befestigungsklammer.

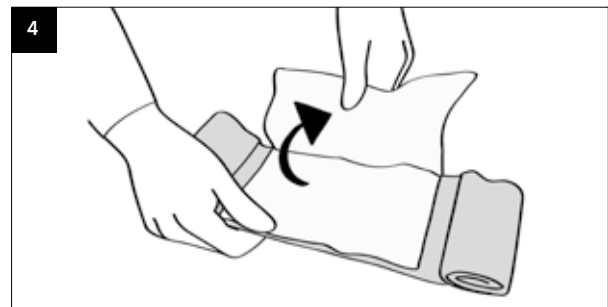

**STEP 4:** Große Wunde/Bauchverletzung: Entfalten Sie die Wundauflage, um seine Größe zu verdoppeln und wickeln Sie die Bandage wie in Schritt 1-3.

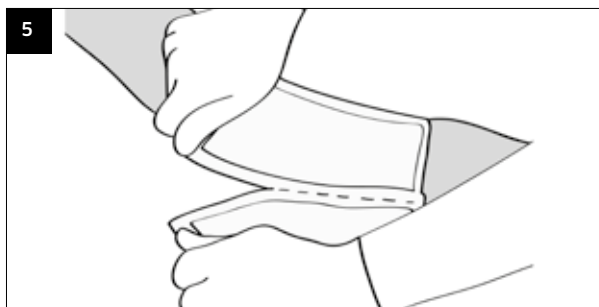


**STEP 5:** Zusätzliche Wundauflage (für Ein- und Austrittswunde): Reißen Sie die zusätzliche Wundauflage an der Perforierung ab. Legen Sie beide Auflagen auf jeweils eine Wunde und folgen Sie den Schritten 1-3.




**STEP 6:** Zusätzliche Gaze: Entnehmen Sie die Gaze. Verwenden Sie diese zB vor dem Verbinden zum Reinigen der Wunde.

# EMERGENCY BANDAGE


## ANWENDUNG BEI EINER GROSSEN WUNDE BZW. ABDOMINALVERLETZUNG

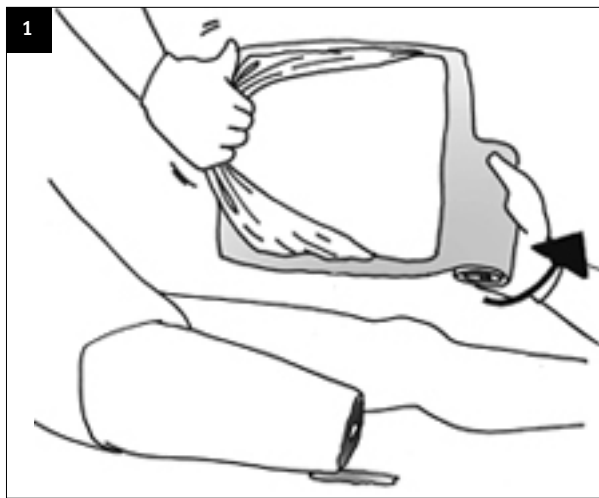


**STEP 1:** Entfernen Sie die Plastikfolie, wenn diese nicht erforderlich ist. Platzieren Sie den Stumpf in der Mitte der Wundauflage.

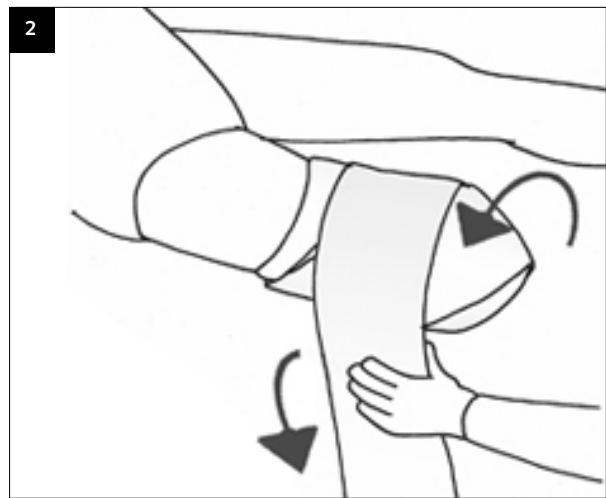

**STEP 2:** Umwickeln Sie den Stumpf 2-3mal.

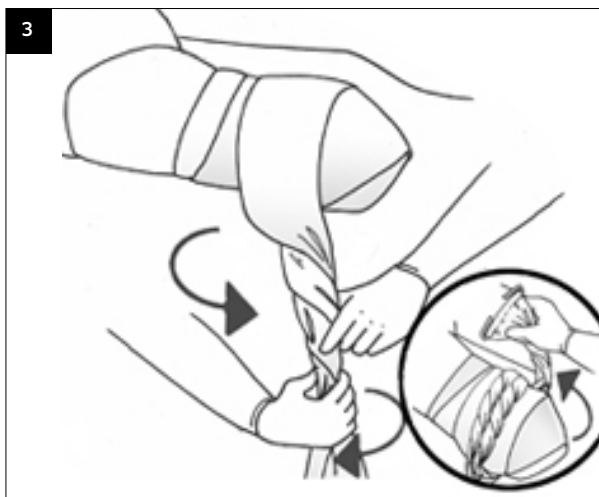


**STEP 3:** Verdrehen Sie die Bandage und wickeln Sie diese anschließend um den Stumpf.

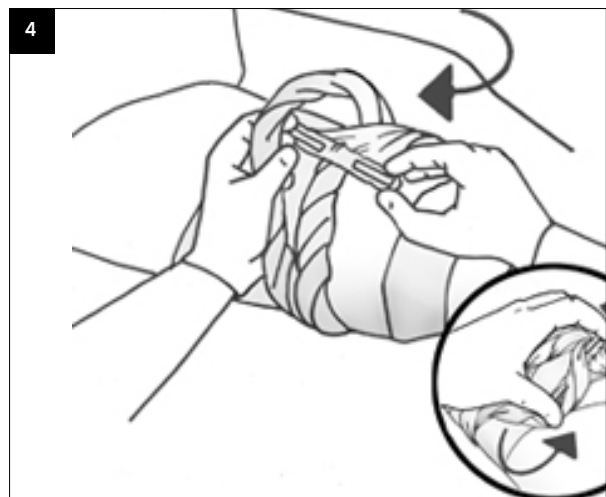


**STEP 4:** Führen Sie die Befestigungsklammer zwischen die verdrehte Bandage und drehen Sie die Befestigungsklammer ähnlich einem Tourniquet. Zum Schluss fixieren Sie die Befestigungsklammer.

# EMERGENCY BANDAGE


## ANWENDUNG BEI EINER HANDVERLETZUNG SELBSTANLAGE

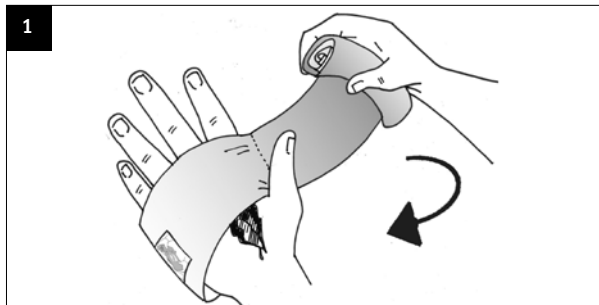


**STEP 1:** Stecken Sie die verletzte Hand durch die Schlaufe der Bandage.

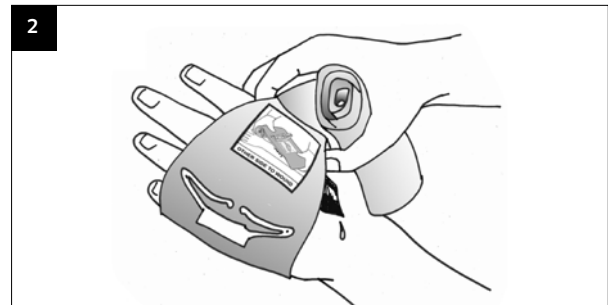


**STEP 2:** Positionieren Sie die Wundauflage und den Druckbügel auf der Wunde.

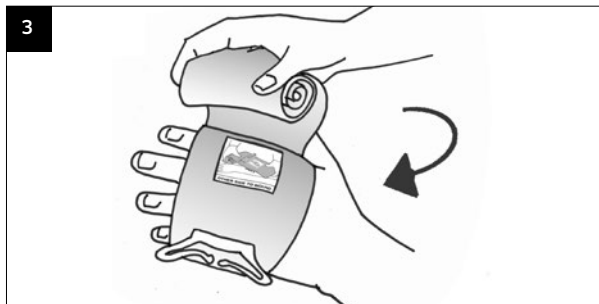


**STEP 3:** Benutzen Sie die andere Hand, um die Bandage zu wickeln.

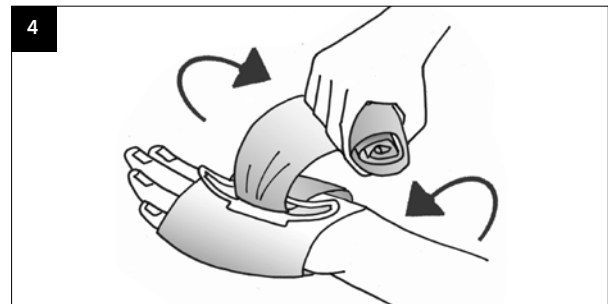

**STEP 4:** Führen Sie die Bandage durch den Druckbügel. Ziehen Sie die Bandage in entgegengesetzter Richtung und drücken Sie den Druckbügel auf die Auflage.

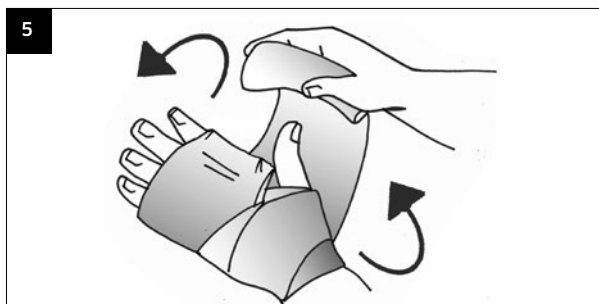


**STEP 5:** Wickeln Sie die Bandage fest über den Druckbügel.

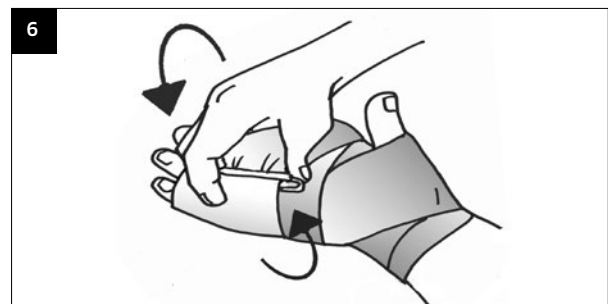


**STEP 6:** Fixieren Sie das Ende der Bandage mit Hilfe der Befestigungsklammer.

# EMERGENCY BANDAGE


## ANWENDUNG BEI VERLETZUNG DER EXTREMITÄTEN

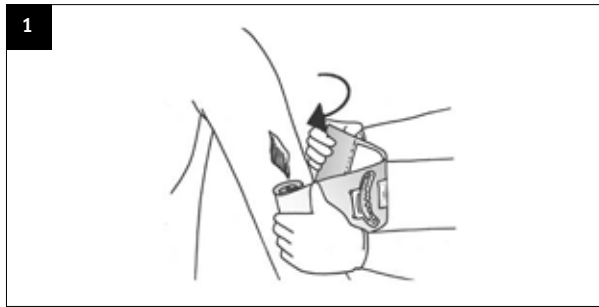


**STEP 1:** Legen Sie die Verbandkomresse auf die Wunde und wickeln Sie den elastischen Verband um den betroffenen Teil des Körpers.

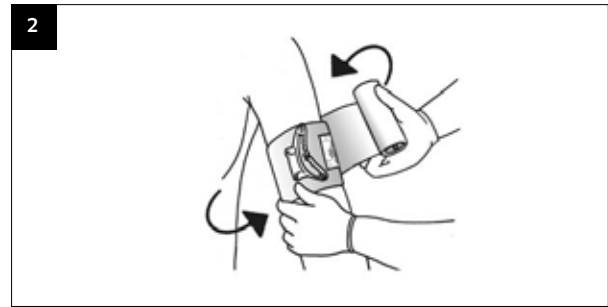


**STEP 2:** Wickeln Sie den elastischen Verband auf die Druckstange.

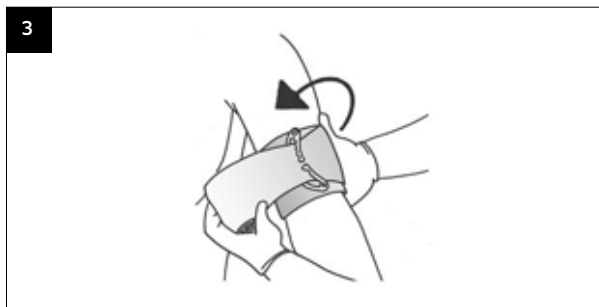


**STEP 3:** Ziehen Sie den elastischen Verband fest und...

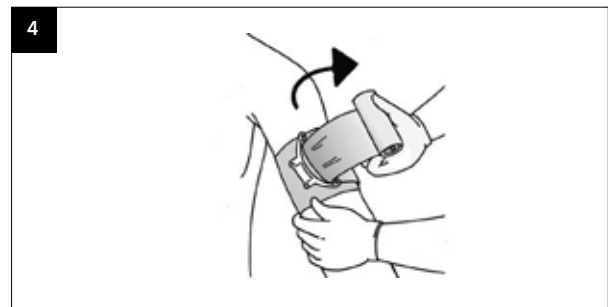

**STEP 4:** ...Ziehen Sie in die entgegengesetzte Richtung, dass die Druckstange auf die Verbandkomresse drückt.

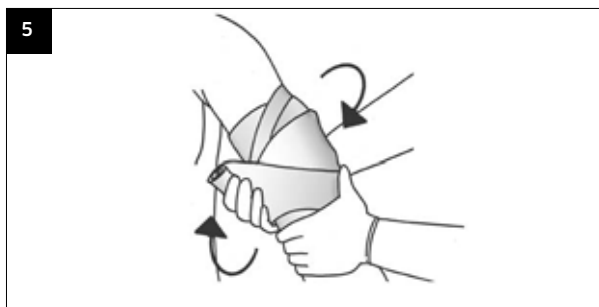


**STEP 5:** Wickeln Sie den Verband fest über die Druckstange und die Ränder der Komresse.

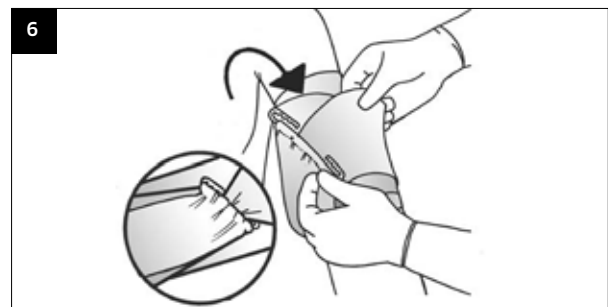


**STEP 6:** Befestigen Sie die Hakenenden der Schließstange am elastischen Verband.

# EMERGENCY BANDAGE

## ANWENDUNG BEI EINER KOPFVERLETZUNG

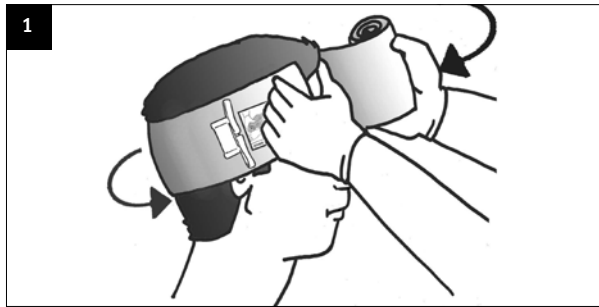

**STEP 1:** Platzieren Sie die Wundauflage auf der Wunde und wickeln Sie die Bandage um den Kopf.

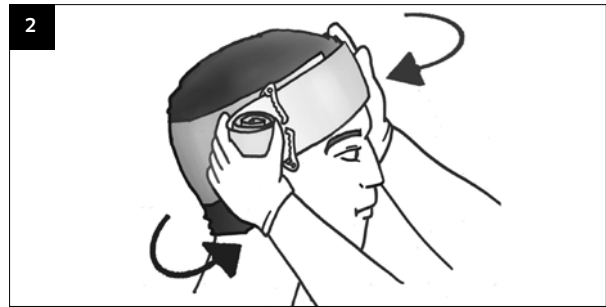

**STEP 2:** Führen Sie die Bandage durch den Druckbügel. Ziehen Sie die Bandage in entgegengesetzter Richtung und drücken Sie den Druckbügel auf die Auflage.



**STEP 3:** Haken Sie die Bandage an einer Ecke des Druckbügels ein und ändern Sie die Richtung der Wicklung.



**STEP 4:** Wickeln Sie die Bandage um das Kinn, dass die Bandage sicher und stabil sitzt.



**STEP 5:** Fixieren Sie das Ende der Bandage mit Hilfe der Befestigungsklammer.

# EMERGENCY BANDAGE

## ANWENDUNG BEI EINER HALSVERLETZUNG



**STEP 1:** Legen Sie den der verwundeten Seite gegenüberliegenden Arm auf den Kopf des Verletzten.



**STEP 2:** Positionieren Sie die Wundauflage und den Druckbügel auf der Wunde.



**STEP 3:** Führen Sie die Bandage durch den Druckbügel. Ziehen Sie die Bandage in entgegengesetzter Richtung und drücken Sie den Druckbügel auf die Auflage.



**STEP 4:** Fixieren Sie das Ende der Bandage mit Hilfe der Befestigungsklammer. Anschließend nehmen Sie den Arm vom Kopf. Dadurch wird zusätzlicher Druck auf die Wunde ausgeübt.